

ClinMass® - Optimisation Mix

Optimisation Mix 2 for Immunosuppressants, lyophilised

Optimierungs Mix 2 für Immunsuppressiva, lyophilisiert

for LC-MS/MS Assay in Whole Blood /
für LC-MS/MS Bestimmung im Vollblut

REF	MS1115
LOT	306
	2016-02

Analyte / Analyt	Content* / Inhalt*
d ₁₂ -Cyclosporine A / d ₁₂ -Cyclosporin A	6.25 µg
¹³ Cd ₂ -Tacrolimus	0.5 µg
¹³ Cd ₃ -Sirolimus	0.5 µg
¹³ C ₂ d ₄ -Everolimus	0.5 µg

*: Weighed analyte amount; value not assayed / Analyteinwaage; Wert nicht experimentell ermittelt.

Intended use:

ClinMass® Optimisation Mixes are used for compound optimisation of the MS/MS parameters and for the test run of the analytical system. The Optimisation Mixes have to be used according to the manual for the ClinMass® complete kit for immunosuppressants (order no. MS1100).

Reconstitution:

Add exactly 2.0 ml mobile phase (order no. MS1010) and mix well.

Storage and stability:

Originally closed and stored below -18 °C, the lyophilised optimisation mix 2 is stable for 36 months, but not longer than the expiration date printed on the label. After reconstitution, the optimisation mix 2 is stable for at least:

- 2 days when stored at 15 - 30 °C.
- 8 days when stored at 2 - 8 °C
- 4 weeks when stored below -18 °C

Pack size:

ClinMass® Optimisation Mix 2 for Immunosuppressants, lyophilised: 2 ml, **order no.: MS1115**

Anwendung:

ClinMass® Optimierungs Mixe werden zur Optimierung der MS/MS-Parameter und für den Testlauf des Analysensystems verwendet. Die Optimierungs Mixe werden entsprechend der Arbeitsanleitung für den ClinMass® Komplettkit für Immunsuppressiva (Best.-Nr. MS1100) eingesetzt.

Rekonstitution:

Zum Fläschchen exakt 2.0 ml Mobile Phase (Best.-Nr. MS1010) geben und gut mischen.

Lagerung und Haltbarkeit:

Originalverschlossen bei < -18 °C aufbewahrt beträgt die Haltbarkeit des lyophilisierten Optimierungs Mix 2 36 Monate, jedoch nur bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum. Nach Rekonstitution ist der Optimierungs Mix 2 wie folgt mindestens haltbar:

- 2 Tage bei 15 - 30 °C
- 8 Tage bei 2 - 8 °C
- 4 Wochen bei < -18 °C

Packungsgröße:

ClinMass® Optimierungs Mix 2 für Immunsuppressiva, lyophilisiert: 2 ml, **Best.-Nr.: MS1115**

RECIPE CHEMICALS + INSTRUMENTS GmbH
Dessauerstr. 3 D-80992 Munich / Germany
Tel.: +49 / 89 / 54 70 81 - 0 Fax: +49 / 89 / 54 70 81 - 11
Internet: www.recipe.de e-mail: info@recipe.de

