

ClinMass® - Internal Standard

25-OH-Vitamin D3-d₆

for / für LC-MS/MS

REF	MS7112
LOT	113
	2014-03

Constituent / Bestandteil	Content* / Inhalt*
25-OH-Vitamin D3-d ₆	2 µg

*: Weighed analyte amount; value not assayed / Analyteinwaage; Wert nicht experimentell ermittelt.

Intended use:

ClinMass® Internal Standards are intended to correct the determined analyte amounts to 100 % recovery. The Internal Standard is added to the sample at the beginning of the sample preparation according to the appropriate application note.

Reconstitution:

We recommend to add exactly 2.0 ml acetonitrile to the vial and mix well.

Storage and stability:

Originally closed and stored below -18 °C, the lyophilised internal standard is stable for 36 months, but not longer than the expiration date printed on the label. After reconstitution, the internal standard is stable for at least 6 weeks, when stored below -18 °C.

Pack size:

ClinMass® 25-OH-Vitamin D3-d₆ (Internal Standard), lyophilised: 2 µg, **order no.: MS7112**

Anwendung:

ClinMass® Interne Standards dienen zur Korrektur der ermittelten Analytenkonzentrationen auf 100 % Wiederfindung. Der Interne Standard wird der Probe zu Beginn der Probenvorbereitung zugesetzt, entsprechend den Angaben der zugehörigen Applikationsvorschrift.

Rekonstitution:

Wir empfehlen, in das Fläschchen exakt 2.0 ml Acetonitril zu geben und gut zu mischen.

Lagerung und Haltbarkeit:

Originalverschlossen bei < -18 °C aufbewahrt beträgt die Haltbarkeit des lyophilisierten Internen Standards 36 Monate, jedoch nur bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum. Nach Rekonstitution ist der Interne Standard bei Lagerung < -18 °C mindestens 6 Wochen haltbar.

Packungsgröße:

ClinMass® 25-OH-Vitamin D3-d₆ (Interner Standard), lyophilisiert: 2 µg, **Best.-Nr.: MS7112**

RECIPE CHEMICALS + INSTRUMENTS GmbH
Dessauerstr. 3 D-80992 Munich / Germany
Tel.: +49 / 89 / 54 70 81 - 0 Fax: +49 / 89 / 54 70 81 - 11
Internet: www.recipe.de e-mail: info@recipe.de

