



## ClinMass® - Internal Standard

Internal Standard for Immunosuppressants, lyophilised  
Interner Standard für Immunsuppressiva, lyophilisiert  
for LC-MS/MS Application in Whole Blood /  
für LC-MS/MS Applikation im Vollblut

REF MS1312  
LOT 116  
S 2014-04

Constituent / Bestandteil	Content* / Inhalt*
d <sub>12</sub> -Cyclosporine A / d <sub>12</sub> -Cyclosporin A	6.25 µg
<sup>13</sup> Cd <sub>2</sub> -Tacrolimus	0.5 µg
<sup>13</sup> Cd <sub>3</sub> -Sirolimus	0.5 µg
<sup>13</sup> C <sub>2</sub> d <sub>4</sub> -Everolimus	0.5 µg

\*: Weighed analyte amount; value not assayed / Analyteinwaage; Wert nicht experimentell ermittelt.

### Intended use:

ClinMass® Internal Standards are intended to correct the determined analyte amounts to 100 % recovery. The Internal Standard is added to the sample at the beginning of the sample preparation according to the appropriate application note.

### Reconstitution:

Add a suitable volume of acetonitrile to the vial and mix well.

### Storage and stability:

Originally closed and stored below -18 °C, the lyophilised internal standard is stable for 36 months, but not longer than the expiration date printed on the label. After reconstitution, the internal standard is stable for at least:  
2 days when stored at 15 - 30 °C.  
8 days when stored at 2 - 8 °C  
4 weeks when stored below -18 °C

### Pack size:

ClinMass® Internal Standard for Immunosuppressants, lyophilised:  
6.25 / 0.5 / 0.5 / 0.5 µg, order no.: **MS1312**

### Anwendung:

ClinMass® Interne Standards dienen zur Korrektur der ermittelten Analytenkonzentrationen auf 100 % Wiederfindung. Der Interne Standard wird der Probe zu Beginn der Probenvorbereitung zugesetzt, entsprechend den Angaben der zugehörigen Applikationsvorschrift.

### Rekonstitution:

Zum Fläschchen ein geeignetes Volumen Acetonitril geben und gut mischen.

### Lagerung und Haltbarkeit:

Originalverschlossen bei < -18 °C aufbewahrt beträgt die Haltbarkeit des lyophilisierten Internen Standards 36 Monate, jedoch nur bis zu dem auf der Packung angegebenen Verfallsdatum. Nach Rekonstitution ist der Interne Standard wie folgt mindestens haltbar:

2 Tage bei 15 - 30 °C  
8 Tage bei 2 - 8 °C  
4 Wochen bei < -18 °C

### Packungsgröße:

ClinMass® Interner Standard für Immunsuppressiva, lyophilisiert:  
6.25 / 0.5 / 0.5 / 0.5 µg, Best.-Nr.: **MS1312**

RECIPE CHEMICALS + INSTRUMENTS GmbH  
Dessauerstr. 3 D-80992 Munich / Germany  
Tel.: +49 / 89 / 54 70 81 - 0 Fax: +49 / 89 / 54 70 81 - 11  
Internet: www.recipe.de e-mail: info@recipe.de

