

ClinTest® - Standard

TOX.I.S.™ Test Solution (Pharmaceuticals) /

TOX.I.S.™ Testlösung (Pharmaka)

for HPLC-DAD-system from Shimadzu /
für HPLC-DAD-System von Shimadzu

REF	60114
LOT	1299
	2022-07

Analyte / Analyt	Concentration / Konzentration
Doxylamine / Doxylamin	-----
Norclozapine / Norclozapin	-----
Doxepin	-----
Carbamazepine / Carbamazepin	-----
Oxazepam	-----
Temazepam	-----
Internal Standard / Interner Standard	-----

Intended use:

ClinTest® Test Solutions are intended to check the daily performance of your HPLC - system. This Test Solution needs no preparation and can be injected directly into your analysing system (injection volume: 1000 µl). After separation, please compare the retention times of the peaks with those of earlier analyses. If you run the Test Solution for the first time, you can compare your results with the chromatogram on the back of this data sheet. Besides retention times you are also able to check peak shape, integration and baseline with your standard chromatogram.

Storage and stability:

Stored at 2 - 8 °C, the unopened Test Solution can be used until the expiry date indicated on the product label. After use of the Test Solution, the bottle must be closed tightly and stored at 2 - 8 °C, to ensure that it can be used until the expiry date indicated on the product label.

Pack size:

ClinTest® Test Solution for TOX.I.S.™ -system from Shimadzu: 1 x 15 ml, **order no.: 60114**

Zweckbestimmung:

ClinTest® Testlösungen dienen zur täglichen Überprüfung der Trennleistung Ihres HPLC-Systems. Diese Testlösung ist gebrauchsfertig und kann direkt in Ihr Analysensystem injiziert werden (Injektionsvolumen: 1000 µl). Nach erfolgter Auftrennung vergleichen Sie bitte die Retentionszeiten der Peaks mit denen der Analysen vergangener Tage. Falls Sie die Testlösung das erste Mal analysieren, können Sie Ihre Ergebnisse mit dem auf der Rückseite dieses Datenblattes abgebildeten Musterchromatogramm vergleichen. Neben der Überprüfung der Retentionszeiten können Sie anhand des Standardchromatogramms auch die Peakform, Integration und Basislinie checken.


Lagerung und Haltbarkeit:

Die ungeöffnete und bei 2 - 8 °C gelagerte Testlösung kann bis zu dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum aufbewahrt werden. Die geöffnete Testlösung ist nach Gebrauch sofort fest zu verschließen und bei 2 - 8 °C zu lagern. Die Testlösung kann dann bis zu dem auf dem Produktetikett angegebenen Verfallsdatum verwendet werden.

Packungsgröße:

ClinTest® Testlösung für TOX.I.S.™ -System von Shimadzu: 1 x 15 ml, **Best.-Nr.: 60114**

**Chromatogram of the Test Solution:
Musterchromatogramm der Testlösung:**

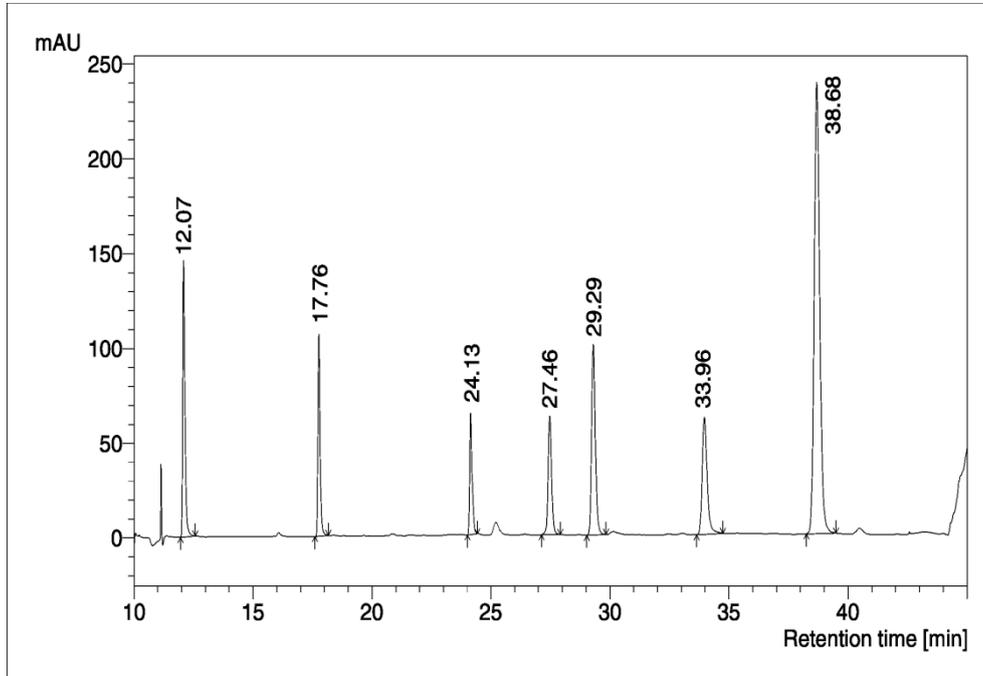

Doxylamine / Doxylamin	12.1 min
Norclozapine / Norclozapin	17.8 min
Doxepin	24.1 min
Carbamazepine / Carbamazepin	27.5 min
Oxazepam	29.3 min
Temazepam	34.0 min
Internal Standard / Interner Standard	38.7 min